




ANLEITUNG IHR PGX

BESTANDTEILE DES TESTKITS:



Abstrichtupfer

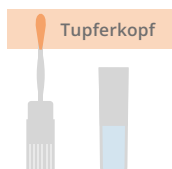


Tupfer Röhre



Anforderungsschein



Retourenlabel

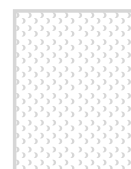

Luftpolsterbeutel

Vor der Probenentnahme
bitte 30 Minuten nicht essen,
trinken oder rauchen.


1

- Entnehmen Sie den Abstrichtupfer aus der Verpackung.
- Öffnen Sie den Abstrichtupfer, ohne den Tupferkopf zu berühren.
- Achten Sie darauf, den Tupferkopf nicht mit den Händen oder anderen Oberflächen in Kontakt zu bringen.

2

- Öffnen Sie den Mund weit.
- Reiben Sie den Tupferkopf mind. 30 Sekunden kräftig an der Schleimhaut an der Innenseite einer Wange.
- Wiederholen Sie den Vorgang an der anderen Wangenseite.
- Lassen Sie den Tupferkopf 10 Minuten an der Luft trocknen, bevor Sie den Abstrichtupfer verschließen.

3


- Stecken Sie den Tupfer nach der Probenentnahme zurück in die Röhre und verschließen Sie diese sorgfältig (der Tupferkopf trocknet selbstständig in der Röhre).
- Wickeln Sie den Abstrichtupfer in den Luftpolsterbeutel.

4

- Füllen Sie den Anforderungsschein leserlich und vollständig aus.
- Unterschreiben Sie den Anforderungsschein.

5

- Aktivieren Sie Ihre Probe online mit dem Aktivierungscode oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone. Den Aktivierungscode sowie den QR-Code finden Sie im Testkit (eingeklebt im Folder mit der Anleitung). Ohne Aktivierung kein Befund!

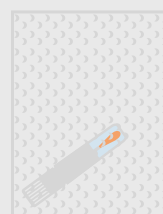
Abstrichtupfer
Luftpolsterbeutel


Anforderungsschein


Retourenlabel
Versandkarton

6

- Legen Sie den eingewickelten Abstrichtupfer sowie den ausgefüllten Anforderungsschein in den Versandkarton.
- Verschließen Sie den Versandkarton sorgfältig (fest andrücken).
- Kleben Sie das Retourenlabel auf den Versandkarton.
- Lagern Sie die Probe bis zum Versand bei Raumtemperatur (15–30 °C).

7

- Werfen Sie den Versandkarton möglichst bald in den nächstgelegenen Postkasten.
- Sobald Ihre Probe analysiert wurde, erhalten Sie Ihren IHR PGX-Befund sowie Ihren persönlichen IHR PGX-Pass.